LA FORATURA AURICOLARE IN FARMACIA

Premessa

La foratura dell'orecchio per accogliere monili è una usanza antica e molto diffusa che interessa oltre il 90% della popolazione femminile e che conta, solo nel nostro paese, oltre 1milione di fori all'orecchio ogni anno. Il costume di praticare il "buchetto" all'orecchio per accogliere gioielli ornamentali è un rito pressoché familiare, che procede dalle mamme verso le loro bambine, dalle nonne verso le nipotine, caricandosi di valori emotivi e talvolta iniziatici, resterà nella memoria come una tappa importante della propria vita. Un servizio di foratura auricolare reso responsabilmente e con professionalità sarà certamente garanzia di un ricordo piacevole e simpatico.

La foratura auricolare praticata in Farmacia da un Operatore Sanitario (o sotto la sua supervisione), mediante modalità ben specifiche e l'impiego di appositi Dispositivi Medicali monouso, non richiede l'autorizzazione delle autorità sanitarie locali (verificare e rispettare eventuali disposizioni regionali o locali). Cosa diversa è invece la pratica invasiva e cruenta del *body-piercing* eseguita in parti del corpo anche ipersensibili, con strumenti di chirurgia quali aghi, cannule e pinze che provocano il sanguinamento, con tutto ciò che ne consegue in termini di rischi di contaminazione, di trasmissione di malattie, di sterilizzazione dei dispositivi, di decontaminazione dell'ambiente e di smaltimento dei rifiuti. Per potere praticare il *body-piercing* è necessaria l'autorizzazione dell'ASL, la abilitazione professionale, la idoneità dell'ambiente di lavoro e l'utilizzo di apparecchiature specialistiche.

Avvertenza a lettura obbligatoria

L'attrezzatura consigliata per eseguire la foratura dell'orecchio è costituita da un **Dispositivo Medicale** specifico che utilizza apposite **Capsule monouso contenenti l'orecchino completamente nascosto e protetto** (incapsulato), ciò per evitare di contaminarlo ed evitare di ferire l'orecchio a seguito di movimenti bruschi. I dispositivi per la foratura dell'orecchio ed i relativi orecchini confezionati in capsule monouso sterili sono stati progettati per praticare la foratura dell'orecchio nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta tra l'elice e l'antelice del padiglione auricolare. Qualsiasi diverso utilizzo in altre zone del corpo non rispetta le indicazioni del produttore e non è consentito.





Per effettuare la foratura auricolare è necessario:

- * conoscere bene il funzionamento del dispositivo
- * utilizzare solamente orecchini in confezione sterile che rispettano le direttive riguardanti la biocompatibilità dei materiali
- * osservare con attenzione le indicazioni operative fornite dal produttore del dispositivo di foratura
- * osservare con attenzione le indicazioni riportate di seguito

Disposizioni Tecnico/Operative per la Foratura Auricolare in Farmacia

LINEE GUIDA

1. Fornitori del Servizio

Il servizio di foratura auricolare con **Dispositivi Medicali** specifici può essere offerto in Farmacia da un **Operatore Sanitario** oppure sotto la sua supervisione senza abilitazioni professionali o autorizzazioni sanitarie.

2. Postazione di lavoro

L'intervento della foratura auricolare deve essere svolto in un'area dedicata della Farmacia. La postazione minima di lavoro prevede:

- * una sedia con braccioli la cui altezza permette all'operatore di lavorare comodamente
- * un piano d'appoggio con superficie lavabile su cui posare l'occorrente per la foratura
- * un vassoio e un contenitore di plastica che ospita l'attrezzatura.

3. Modulo per il Consenso e la Registrazione degli interventi

Prima della foratura, il cliente deve compilare e firmare il modulo per il consenso e per la registrazione dell'intervento. Nel caso di minori di 18 anni è necessaria la firma del genitore/tutore.

Il modulo contiene l'informativa, da rilasciare al cliente, con le avvertenze circa l'importanza della attenta e assidua igiene della zona trattata nei giorni che seguono l'intervento di foratura. E' buona norma informare e responsabilizzare anche verbalmente il cliente in merito a queste indicazioni di pulizia per assicurare una sana e rapida cicatrizzazione del foro.

4. Dispositivi per la Foratura dell'Orecchio

L'attrezzatura consigliata per eseguire la foratura dell'orecchio è costituita da un **Dispositivo Medicale** specifico che utilizza apposite **Capsule monouso contenenti l'orecchino completamente nascosto e protetto** (incapsulato). Non è consigliato l'utilizzo di dispositivi nei quali l'orecchino è esposto e visibile (esso potrebbe inavvertitamente essere contaminato oppure ferire il cliente o l'operatore), e neppure l'utilizzo di dispositivi automatici a molla (è ampiamente documentato che la forte spinta della molla provoca la nebulizzazione del liquido biologico con la conseguente contaminazione del dispositivo).

Modalità di conservazione e gestione dei dispositivi:

- * mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento
- * conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto.
- * aprire le confezioni contenenti le capsule monouso solo al momento dell'uso.

L'utilizzo dei dispostivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.





5. Preparazione

Fare sedere il cliente. Rimuovere eventuali orecchini già presenti. Mantenere libera la zona auricolare da capelli e lembi di abiti: si consiglia di tenere a disposizione una molletta raccogli-capelli.

Indossare guanti in lattice monouso: il loro utilizzo è consigliato per tutti gli interventi. L'utilizzo dei guanti di lattice segnala professionalità e rispetto per il cliente.

6. Pulizia e controllo dell'orecchio

Pulire con cura l'area dell'orecchio interessata alla foratura utilizzando detergenti dotati di proprietà battericida. Verificare visivamente che l'orecchio sia sano e integro: non praticare il foro in presenza di cisti, verruche, abrasioni, capillari o altre condizioni delicate.

7. Punto di foratura

Segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non tossica, il punto in cui verrà eseguita la foratura, secondo le indicazioni del cliente. In presenza di richieste particolari, ricordare al cliente che i dispositivi di foratura dell'orecchio ed i relativi orecchini sono stati prodotti per praticare la foratura dell'orecchio solamente nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta posta tra l'elice e l'antelice. Evitare di eseguire il foro se il punto scelto è prossimo a un foro preesistente o se è troppo vicino al bordo dell'orecchio: eventualmente consigliare un punto alternativo. Prima di procedere, dare modo al cliente, tramite uno specchio, di confermare la scelta. Nella eventualità che la posizione del foro da eseguire non sia di gradimento del cliente ripartire dal punto 7.

8. Orecchini

Utilizzare esclusivamente orecchini in confezione integra ancora sigillata e aprirli solamente davanti al cliente al momento della foratura (su richiesta il produttore/distributore di orecchini è tenuto a fornire la documentazione relativa alla certificazione ISO 11737-2 "Sterilizzazione dei dispositivi medici).

Gli orecchini devono rispettare le direttive in vigore relative ai metalli bio-compatibili (Direttiva Europea 94/27/EC riguardante il Nichel) e il loro imballo deve essere contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo.

9. Dopo la foratura

A foratura eseguita, invitare il cliente ad osservare il risultato tramite uno specchio. Prima di farlo alzare dalla sedia, accertarsi che il cliente sia tranquillo e che abbia compreso le indicazioni per la buona cura del foro all'orecchio nei giorni successivi. Consigliare l'utilizzo giornaliero di prodotti specifici disinfettanti e cicatrizzanti fino alla completa cicatrizzazione del foro.

10. Fine lavoro e gestione dei rifiuti

Gli strumenti e i materiali di consumo vanno riposti e conservati in un luogo pulito e asciutto. La capsula vuota deve essere rimossa dallo strumento. I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell'orecchio possono essere eliminati normalmente. I rifiuti sono venuti a contatto solamente con la pelle integra prima della foratura e di conseguenza non contengono tracce di liquido biologico per il quale sarebbero previsti speciali contenitori.

Note: Rispettare eventuali disposizioni nazionali, regionali o locali che riguardano la pratica della foratura dell'orecchio nel vostro territorio.

FORATURA DELL'ORECCHIO – SEQUENZA ILLUSTRATA



aprire la cassettina



rimuovere la pellicola di sigillo




estrarre la capsula



inserire la capsula nel dispositivo



spingere fino al "click"

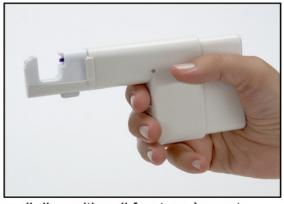

il dispositivo di foratura è pronto



pulire bene e controllare la zona di foratura, indossare guanti di lattice.



con la penna atossica indicare il punto di foratura chiedendo conferma



avvicinarsi all'orecchio



puntare verso il segno di foratura



premere il dispositivo avvicinandosi al punto di foratura



con mano ferma premere con decisione




è importante premere fino in fondo per assicurarsi l'aggancio alla farfallina



rilasciare lo strumento



abbassare il dispositivo facendolo scivolare dalla farfallina

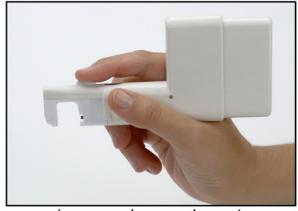

rimuovere la capsula vuota azionando il pulsante di espulsione